

ETAPA 3 Material para o processo de avaliação:

A confirmação do pagamento é gerada em até 3 dias, sendo providenciado o envio do material para avaliação:

- o manual
- as lâminas / casos práticos
- folha resposta

Todo o material será enviado através da internet para o e-mail cadastrado pelo serviço.

Após o recebimento do Kit Proquad o serviço deverá providenciar o material solicitado para análise (as aquisições de phantons e imagens de pacientes/voluntários deverão ser realizadas por um único profissional, caso exista mais de um profissional os demais deverão submeter-se ao processo de aquisição de imagens e phantons, o cálculo do CV% e LSC do serviço será a média) .

O serviço deverá acessar novamente o site para lançar os Dados Precisa (antes de enviar o material para o ProQuaD), seguindo os mesmos passos: www.proquad.org.br , digitando login e senha:

Menu

- :: [Principal](#)
- :: [Cadastro Equipamento](#)
- :: **[Dados Precisa](#)**
- :: [Comprar Selos](#)
- :: [Logout](#)

Ao clicar em : **Dados Precisa** , aparecerá esta imagem na tela:

Equipamentos para Preencher o Precisa

Fabricante	Modelo	Nº Serie	Nº de Registros	Confirma o Término	Dados do Precisa
GE/Lunar(exemplo)	teste	Teste	0	Confirma o Término	Abrir

Clicar em : **Abrir**

Formulários
Phanton
15 Pacientes
30 Pacientes

Escolha o tipo de formulário

30 phantoms: com ou sem reposicionamento (obrigatório)

Precisa 2007	
PHANTON	
▶▶ [Escolha] ▼	
Phanton #1	<input type="text"/>
Phanton #2	<input type="text"/>
Phanton #3	<input type="text"/>
Phanton #4	<input type="text"/>
Phanton #5	<input type="text"/>
Phanton #6	<input type="text"/>
Até	
Phanton #30	<input type="text"/>
Enviar Dados	

Com reposicionamento ou
Sem reposicionamento

No campo **escolha** tem as opções para serem selecionadas:

- Ap Spine
- Proximal Fêmur (neck)
- Proximal Fêmur (total)
- Distal Rádios (UD)
- Distal Radius (33)
- Lateral Spine
- Total Body (BMD)

Obs.: Lembrando que as incidências obrigatórias a serem entregues são: Ap Spine e Proximal Fêmur (neck e total).

15 pacientes: 3 vezes o mesmo paciente com e sem reposicionamento;

Precisa 2007			
15 Pacientes			
▶▶ [Escolha] ▼			
Paciente	BMD #1	BMD #2	BMD #3
Paciente #1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Paciente #2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Até			
Paciente #15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Enviar Dados			

Ou,
 30 pacientes: 2 vezes o mesmo paciente com e sem reposicionamento

Precisa 2007		
30 Pacientes		
▶▶ [Escolha] ▼		
Pacientes	BMD #1	BMD #2
Paciente #1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Paciente #2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Paciente #3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Até		
Paciente #30	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Enviar Dados		

Ao finalizar os lançamentos click em:

Equipamentos para Preencher o Precisa 2007

Fabricante	Modelo	Nº Serie	Nº de Registros	Confirma o Término	Dados do Precisa
GE/Lunar(exemplo)	teste	Teste	0	Confirma o Término	Abrir

Após **enviar dados**, estes são recebidos pelo Proquad . Caso esteja incompleto, o processo de avaliação, só terá continuidade após recebimento completo do material.

O material a ser enviado ao ProQuaD via correio são: CD OU PENDRIVE(exames e phantoms), folha resposta, e cinco laudos.